

 **BRUKSANVISNING NORSK**

# Zero G elektrisk løftestol

**Art. 821031**



**IDENTITES**

Boulevard de la Chanterie - ZA Pôle 49 – 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

Fabriqué en Chine

## INTRODUKSJON

Zero G-løftestolen er designet for å hjelpe folk enkelt å komme seg ut av stolen ved hjelp av elektronisk styrte motorer.

Les bruksanvisningen nøye for å sikre riktig bruk av stolen, spesielt sikkerhetsmerkene.

Spesifikasjon			
Setebredde	50 cm	Strømforsyning	100-240VAC 50Hz – 40W
Setedybde	50 cm		Motor Okin
Setehøyde	53 cm		
Rygghøyde	71 cm	Materiale	PU og mikrofiber trekk
Stol vekt	58 kg.		Tre- og stålkonstruksjon
Maksimal bruker vekt	155 kg		PU skum og polyester fiber fylling

## SIKKERHET

1. Monter stolen riktig i henhold til vedlagte monteringsanvisning. Stolprodusenten, deres agenter og distributører er ikke ansvarlige for skader forårsaket av feil montering.
2. Plasser stolen på et jevnt, flatt gulv.
3. Ikke bruk stolen i et ekstremt fuktig eller støvete miljø for å unngå faren for elektrisk støt og mekaniske problemer. Stolen bør plasseres i et tørt rom. Ikke bruk stolen når omgivelsestemperaturen overstiger 40 grader.
4. Ikke bruk stolen utendørs.
5. Når stolen ikke skal brukes på lang tid, trekk ut pluggen fra stikkontakten for å unngå overoppheting.
6. Ikke plasser tunge gjenstander på armlenene, fotstøtten eller stolryggen.
7. Ikke hopp eller lek på stolen. Barn som bruker stolen, må være under oppsyn av en voksen. Stolen er ikke designet for barn.
8. Sørg for at spenningen samsvarer med spesifikasjonene som er oppført for stolen. Den elektriske tilkoblingen må utføres i henhold til relevante forskrifter. Ikke koble pluggen fra stikkontakten brått eller trekk ut pluggen ved å trekke i ledningen.
9. Ikke sett i eller trekk ut pluggen av stikkontakten med våte hender. Det kan være fare for elektrisk støt eller mekanisk havari.

10. Ikke bruk stolen hvis ledningen eller støpselet adapteren er skadet eller stikkontakten er for løs.

11. Vær forsiktig når du betjener løftefunksjonen når stolryggen er tilbaketrent. Ryggstøtten må være i vertikal stilling når du går opp i eller ut av stolen, unntatt ved sideforskyvning med vertikal heving.

12. Aktiver styrebremsen og sørg for at stolen er stabil før forflytning.

Ta kontakt med forhandleren i tilfelle feil.

**Merk:** Alle reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere.

**Forsiktig:** En plutselig temperaturøkning kan skape kondens på elektriske eller mekaniske deler. Det anbefales å la stolen stå i romtemperatur i minst én time før bruk for å sikre riktig drift og redusere risikoen for mekanisk feil.

Ikke bruk løftestolen i følgende situasjoner:

- a) Utilsiktet søl av vann på enheten. Dette kan forårsake elektrisk støt.
- b) Rivning av trekket, blottlegging av innvendig mekanikk.
- c) Feil eller annen unormal tilstand under drift.

Vær forsiktig ved strømbrudd. Det er fare for skade hvis strømmen uventet kommer tilbake og betjeningsknappene aktiveres.

Unngå å bruke stolen under kraftige stormer.

Trekk pluggen ut av stikkontakten hvis det er synlig skade eller feil.

## MONTERINGSVEILEDNING

- 1) Ta setet og ryggstøtten ut av emballasjen.
- 2) Hold setet og trekk klaffen med begge hender og juster brakettene.
- 3) Legg nedover og sørg for at begge sider klikker på plass.



Steg 1



Steg 2



Steg 3


**Merk:** De to bakre støttene må skyves på de vertikale stengene samtidig for å unngå blokkering.

**Merk:** Ikke sett sammen stolen hvis polstringen eller noen del av stolen er skadet.

## Elektrisk tilkobling

**Merk:** Ledninger må være riktig tilkoblet for riktig drift.

- 1) Motor til ledningskontakt
- 2) Ledningskontakt til adapter
- 3) Adapterkontakt til plugg
- 4) Koble til fjernkontrollen

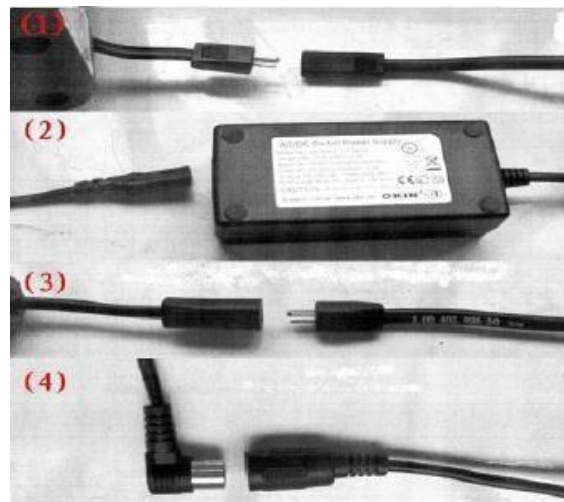

## STOLPOSISJONERING

La det være nok plass foran og bak på stolen slik at den kan vippes bakover.

For å brette ryggen helt bak, hold en minimumsplass på 65 cm bak stolen.

La det være minst 40 cm foran stolen.

Plasser stolen på en jevn overflate eller gulv i et tørt rom.

## **Forsiktighet**

Fjern eventuelle hindringer bak eller foran stolen for å tillate sikker ryggtilt og heving under drift.

Området mellom sete og fotstøtte må være fri for rot for å unngå klemfare når stolen er i bruk.

## **VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING**

### **1. Oppbevaring**

Tørk av støv og skitt. Hold stolen ren og vekk fra steder med høy luftfuktighet.

Hvis stolen ikke skal brukes over lengre tid, dekk den til med et stykke tøy for å beskytte den mot støv. Oppbevares på et tørt sted.

Ikke oppbevar stolen i direkte sollys eller på steder der temperaturen er høy. Eksponering kan føre til at stoffet falmer.

### **2. Vedlikehold**

Før rengjøring, sørg for at bryteren er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Ikke bruk våtservietter til å rengjøre polstrede stoler i kunstskinn (polyuretan) med mindre det er vårt inkontinensbestandige kunstskinn. Rengjøringsmidler for lær kan brukes.

### **3. Lenestolkropp**

Bruk veldig mild såpe for å rengjøre stolens plast, struktur og trekk. Rengjør forsiktig eventuelle spor av såpe med en tørr klut.

For å rengjøre en tørr flekk, dypp et stykke myk klut i varmt såpevann, vri godt og rengjør flekken.

Ikke bruk rengjøringsmidler som benzen eller tynner, eller andre rengjøringsmidler som kan forårsake misfarging av stoffet eller ripe opp belegget.

Ikke fjern dekselet for å rengjøre det. Det er strengt forbudt å stryke belegget med strykejern.

## BRUKE FJERNKONTROLLEN

ZERO G løftestol er utstyrt med en vertikal heve- og senkefunksjon. Denne funksjonen gjør at stolen kan heves eller senkes etter behov, slik at brukeren trygt kan flyttes fra stolen til sengen eller annen overflate.

**Forsiktig:** Sørg for at låsene er aktivert på de bakre hjulene på stolen under forflytning for å unngå ulykker eller skader.

Bruk kun en tørr klut til å rengjøre fjernkontrollen. For høy fuktighet kan skade fjernkontrollen.

- 1 - Hev stolen
- 2 - Vipp ryggstøtten, senk fotstøtten og Zero Gravity-funksjon

