

ProClassic Løftestol på hjul

REF. 821061 & 821061.BLEU





BRUKERVEILEDNING

NO

INTRODUKSJON

Pro Classic løftestol er designet for å hjelpe folk med å komme seg enkelt ut av stolen ved hjelp av elektronisk styrte motorer. Les instruksjonene nøye for å sikre riktig bruk av stolen, spesielt sikkerhetsinformasjonen.

SPESIFIKASJON

Sete bredde	55 cm
Sete dybde	54 cm
Sete høyde	51 cm
Rygg høyde	70 cm
Stolens vekt	60 kg
Max belastning	160 kg
Strømforsyning	100 - 240V // 50Hz - 70W
Materiale	PU og microfiber trekk
	Tre og stål ramme
	PU foam & polyester fiber fyll

SIKKERHET

1. Monter stolen riktig i henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Stolprodusent, deres agenter og distributører er ikke ansvarlige for skader forårsaket av feil montering.
2. Plasser stolen på et jevnt og flatt gulv.
3. Ikke bruk stolen i et ekstremt fuktig eller støvete miljø for å unngå risiko for elektrisk støt og mekaniske problemer. Stolen bør plasseres i et tørt rom. Ikke bruk stolen når romtemperaturen overstiger 40 grader Celsius.
4. Ikke bruk stolen utendørs.
5. Hvis stolen ikke skal brukes over lengre tid, trekk ut strømledningen fra stikkontakten for å unngå overoppheting.
6. Ikke plasser tunge gjenstander på armlenene, fotstøtten eller ryggstøtten.
7. Ikke hopp eller lek på stolen. Barn som bruker stolen må være under oppsyn av en voksen. Stolen er ikke beregnet for barn.
8. Sørg for at spenningen samsvarer med spesifikasjonene som er angitt for stolen. Den elektriske tilkoblingen må gjøres i samsvar med lokale forskrifter. Ikke trekk støpselet plutselig ut av stikkontakten, og ikke trekk det ut ved å dra i ledningen.
9. Ikke koble pluggen til eller fra stikkontakten med våte hender. Det kan være fare for elektrisk støt eller mekanisk feil.
10. Ikke bruk stolen hvis ledningen eller plugg er skadet, eller hvis stikkontakten er for løs.
11. Vær forsiktig når du bruker hevefunksjonen når stolens rygg er lent tilbake. Ryggstøtten må være i oppreist stilling når brukeren sitter i stolen.
12. Kontroller at hjulet ikke går i stykker, og at lenestolen er stabil før forflytning.

Ved funksjonsfeil, kontakt forhandleren.

Merk: Alle reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere.

Advarsel: En plutselig temperaturøkning kan forårsake kondens på elektriske eller mekaniske deler. Det anbefales at stolen står i romtemperatur i minst én time før bruk for å sikre riktig drift og redusere risikoen for mekanisk feil.

Ikke bruk stolen i følgende situasjoner:

- a) Utsiktet søl av vann på apparatet. Dette kan forårsake elektrisk støt.
- b) Rift i lokket, slik at den indre mekanikken blir eksponert.
- c) Feil eller andre unormale forhold under bruk.

Vær forsiktig ved strømbrudd. Det er fare for skade hvis strømmen uventet gjenopprettes og betjeningsknappene aktiveres.

Unngå å bruke stolen i kraftig tordenvær.

Slå av strømkontrollen umiddelbart og trekk ut strømledningen fra stikkontakten ved synlig skade eller funksjonsfeil.

SAMMENSTILLING


1. Ta setet og ryggstøtten ut av emballasjen.
2. Hold setet og klaffen med to hender og juster støttene.
3. Trykk nedover og skyv til begge sider er låst.



STEP 1



STEP 2

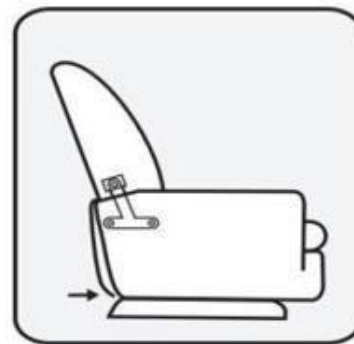

STEP 3


Merk: De to bakre støttene må monteres på de vertikale stengene samtidig for å forhindre at de setter seg fast.

Merk: Ikke monter stolen hvis trekket eller noen del av stolen er skadet.

ELEKTRISKE KOBLINGER

Merk: Ledningene må kobles riktig for riktig drift.


1. Motor-til-ledningskontakt
2. Adapterkontakt til plugg
3. Fjernkontroll tilkobling

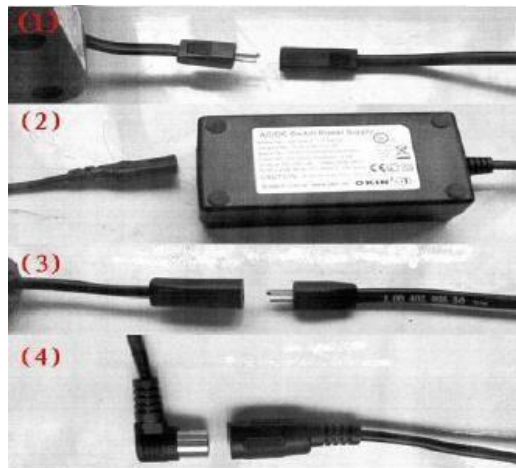

MONTERING AV HANDTAK

Rygghåndtaket skal være montert ved levering.

Rett håndtakshullene inn i forhold til hullene på lenestolen og fest dem med de medfølgende skruene.

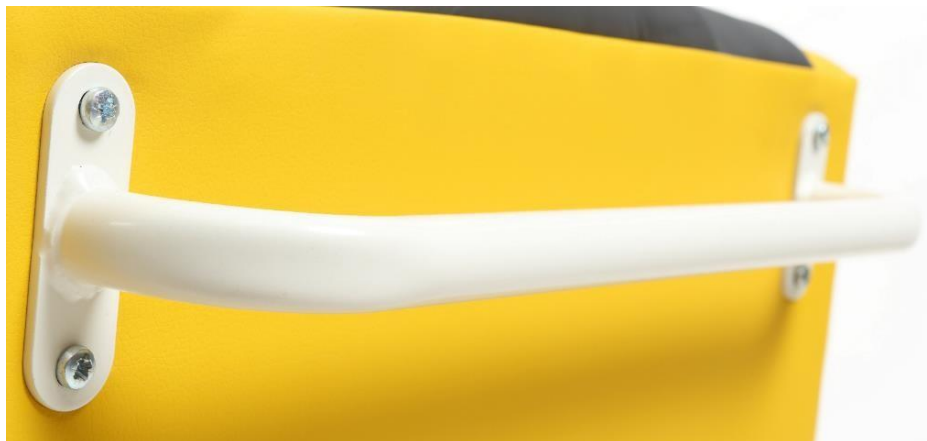

PLASSERING AV LØFTESTOLEN

La det være nok plass foran og bak stolen slik at den kan lenes tilbake. For at stolen skal kunne lenes fritt, må det være minst 65 cm plass bak stolen. La det være minst 40 cm plass foran stolen. Plasser stolen på en jevn overflate eller et gulv i et tørt rom.

Advarsel

Fjern eventuelle hindringer bak eller foran stolen for å muliggjøre trygg tilbakelening og heving under bruk.

Området mellom setet og fotstøtten må være fritt for hindringer for å unngå klemfare når stolen er i bruk.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

1. Oppbevaring

Tørk bort støv og smuss. Hold stolen ren og unna områder med høy luftfuktighet.

Hvis stolen ikke skal brukes over lengre tid, dekk den til med en klut for å beskytte den mot støv. Oppbevares tørt. Ikke oppbevar stolen i direkte sollys eller i områder med høye temperaturer. Eksponering kan føre til at stoffet falmer.

2. Stell

Før rengjøring, sørg for at bryteren er slått av og at støpselet er koblet fra stikkontakten. Ikke bruk våtservietter til å rengjøre stoler med trekk i imitert skinn (polyuretan), med mindre det er vårt inkontinensresistente imiterte skinn. Rengjøringsmidler for skinn kan brukes.

3. Stolens understell

Bruk veldig mild såpe til å rengjøre plast, struktur og trekk på stolen. Tørk forsiktig bort eventuelle såperester med en tørr klut. For å rengjøre en tørr flekk, bløtlegg en myk klut i varmt såpevann, vri den godt opp og rengjør flekken.

Ikke bruk rengjøringsmidler som benzen eller tynnere, eller andre rengjøringsmidler som kan misfarge stoffet eller ripe opp trekket. Ikke fjern trekket for rengjøring. Det er strengt forbudt å stryke trekket.

RESERVE BATTERI SYSTEM

Lenestolen er utstyrt med et nødbatteri slik at brukeren kan stå oppreist ved strømbryt. To 9-volts batterier er nødvendig og følger ikke med lenestolen. Ved strømbryt vil lenestolen automatisk bytte til nødbatteriene, men bare i løpet av en batterisyklus.

Det anbefales å bytte batterier etter hver nødbruk.

BRUKEN AV FJERNKONTROLL

PRO CLASSIC-lenestolen har en funksjon for heving og vertikal tilbakelenking. Denne funksjonen gjør det mulig å heve og senke lenestolen, og om nødvendig muliggjør den sikker forflytning av brukeren fra lenestolen til en seng eller andre overflater.

Når lenestolen er løftet til ønsket høyde, kan armlenet på forflytningssiden fjernes slik at brukeren kan gli over på sengen eller andre overflater. Begge armlenene kan fjernes for sideveis forflytning.

Advarsel: Lås bakhjulene for å unngå ulykker eller skader under forflytning.

Bruk kun en tørr klut til å rengjøre fjernkontrollen. For mye fuktighet kan skade fjernkontrollen.

Distributør/Distributed by :
IDENTITES
Boulevard de la Chanterie – ZA Pôle 49
49124 Saint Barthelemy d'Anjou
FRANCE
Téléphone : 02.41.96.18.48