

# IDENTITÉS

## SENGEHEST MED GULVSTØTTE

### Art. 823067


Liste over komponenter

A – Handtak x 1

B - Ben x 2

C – Tverrstøtte x 1

D - Låsepinner x 2 (Festet til bena)

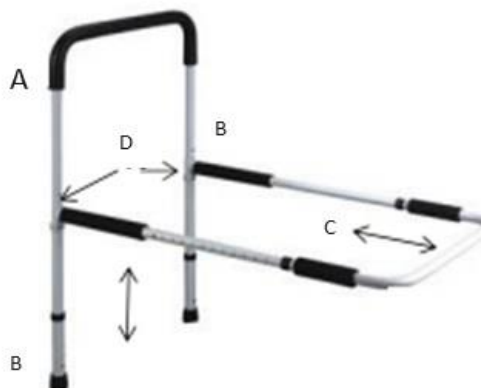

#### Før du starter

- Les monterings- og bruksanvisningen
- Sjekk innholdet i pakken
- Sørg for godt utstyr, tilstrekkelig og ren plass til å utføre monteringen

#### Monteringsanvisning

1. Monter handtak A med begge ben B. Lås enheten ved hjelp av låsepinnene D til hvert ben og sørg for at låsepinnene er festet perfekt til metallrøret.
2. Monter så tverrstøtten C. For å gjøre dette, monter de to delene ved å trykke på låseknotene samtidig. Juster sammenstillingen i henhold til madrassens bredde (ideelt sett 2/3 av madrassens bredde) og lås ved å skyve rørene slik at låseknotene passer perfekt inn i hullene i rørene.
3. Fjern madrassen fra sengen (få hjelp om nødvendig)
4. Plasser enheten på sengerammen, og plasser den langs sengen på ønsket sted.
5. Sett madrassen tilbake på plass, over den installerte enheten (få hjelp om nødvendig).
6. Juster høyden på støttehandtaket ved å fjerne låsepinnene D og skyve opp eller ned for å oppnå ønsket høyde.
7. Juster høyden på bena ved samtidig å trykke på låseknotene og skyve bena for å justere sammenstillingen til riktig høyde. Pass på at låseknotene passer perfekt inn i et av hullene i røret. Begge føttene må stilles i samme høyde.

#### Vedlikehold:

Rengjør regelmessig med et vanlig rengjøringsmiddel. Bruk aldri skurende produkter. Kontroller med jevne mellomrom monteringen, og spesielt festene.

#### VIKTIG:

Les denne merknaden før du bruker den.

Ta vare på emballasjen og disse instruksjonene for mulig fremtidig bruk.

Låseknotene på føttene må alltid ha perfekt inngrep i hullene på rørene.

MAKSBELASTNING = 65 kg

Denne enheten er designet for å gi støtte og stabilitet til brukeren. Det er på ingen måte ment å støtte den fulle vekten til en person.

MAÅ IKKE BRUKES I BARNESENG OG PEDIATRI