

TELESKOPRAMPE 73 – 150 cm

Portabel rullestol rampe – Eloksert aluminium

Art. 826079




Vennligst inspiser nøye alle deler for sprekker/brudd før bruk.

- Aluminiumskonstruksjon
- Sklisikker overflate

Monteringsinstruksjon

Disse rampene består av tre seksjoner sammenføyd til en. For å fjerne dem helt, trekk i seksjonene 1 og 2 til låseknappene er helt ute av hullene.

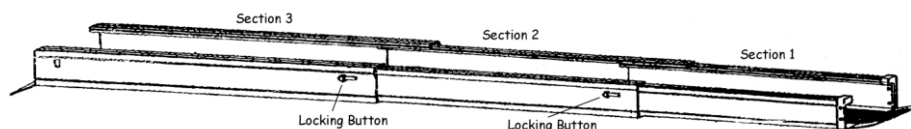

Pass på at låseknappene er helt i inngrep, hvis ikke kan rampen bli ustabil og forårsake skade på brukeren.



Personer med alvorlige funksjonshemminger eller personer som ikke er i stand til å gå uten hjelp, bør ikke forsøke å bruke dette produktet uten hjelp.


Bruksanvisning - Brukerveiledning

For å bestemme lengden på rampen du trenger, må du først bestemme skråningen. Stigningen er høyden fra bakken til der toppen av rampen skal plasseres.

En helning på 2:12 (9,5 grader) er en akseptabel helning for bærbare ramper som brukes av besatte stoler og scootere med en utdannet ledsager.

For å finne en stigning på 2:12, ta den totale stigningen og hvis du har en stigning på 12", del den på 2 og det resulterende tallet vil være lengden på rampen som kreves i fot, eller du trenger en 6' rampe.

NB! Det må tas hensyn til om underlaget er plant eller skrånende i forhold til rampen som er plassert

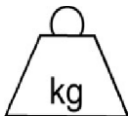

Maximal vekt: **300 kg**



Identites – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

