

Lett transportrullestol - sammenleggbar

Brukerveiledning

Medisinsk utstyr

**REF. 874001.R – 874001.G - 874006.G - 874006.R - 874007.G -
874007.R- 874009.R- 874009.G – 874012G**



Symboler på etiketter eller brukerveiledning

	Adresse til fabrikant		Invitasjon til å lese brukermanual
	Fabrikasjonsdato		Følg sikkerhetsinstruksjoner
	Lot nummer		CE samsvar
	Produkt referanse		Tåler ikke fukt
	Max bruker vekt		Det medisinske direktiv



Brukerveiledning

VIKTIG

Les instruksjonene nøye før du bruker dette produktet og oppbevar dem hvis nødvendig.

Bruker: Hvis du ikke er i stand til å lese eller forstå noen advarsler, forholdsregler eller instruksjoner, vennligst kontakt ditt helsepersonell eller distributør før du bruker dette produktet, ellers kan det oppstå risiko for skade.

Rådfør deg med legen din eller helsepersonell før du bruker en rullestol. Han eller hun vil gi råd og informere deg om den mest hensiktsmessige bruken i ditt tilfelle.

Distributør: Dette pakningsvedlegget må gis til brukere av dette produktet.

PRODUKT FORMÅL

Transportrullestol er ganghjelpemidler for bevegelseshemmede. Disse produktene er beregnet for bruk innendørs og kan foldes sammen for enkel oppbevaring eller transport.

PRODUKT BESKRIVELSE



Oversettelse FRANSK - NORSK

Coussin dossier	Rygg pute
Accoudoir	Armlene
Barre transversale double	Dobble stag
Plaque de pied	Fotplate
Poignée de main	Handtak
Frein auxiliaire	Bremse
Dossier demi-pliant	Handak for folding av rygg
Frein à main	Handbremse
Roue arrière	Bakhjul



Ved i ikke følge sikkerhetsinstruksjonene så kan en risikere alvorlige hendelser.

Unnlatelse av å følge sikkerhetsreglene kan føre til risiko for alvorlig skade.

- Ikke overskrid den maksimale vektgrensen på 135 kg.
- Sørg for at alle deler er sikre og i god stand.
- Ikke bruk produktet i trapper eller rulletrapper.
- Bruk kun tilbehør og deler levert av produsenten.
- Ikke foreta noen justeringer på produktet mens det er i bruk.
- Kontroller at bremsene fungerer som de skal før bruk.
- Under bruk, lås bremsene for alle handlinger.
- Alle hjul skal alltid være i kontakt med bakken.
- Transportrullestolen kan bli brukt utendørs bare for forflytning fra A til B på et flatt underlag og i en begrenset tidsperiode.
- Alltid transporter rullestol brukeren i et sete godkjent av leverandøren og bruk alle tilgjengelige sikkerhetsseler.
- Ikke bruk rullestolen på trafikkerte veier eller steder.
- Når produktet er i stasjonær stilling, må bremsene være låst. Ikke forsøk å flytte produktet hvis bremsene er låst.
- Vær sikker på at alle bremses er på når en setter seg eller forlater rullestolen, eller når du er i en heis eller rullestol heis. Rullestolen må være på et flatt og stabilt underlag.
- Pass på at fotstøttene er ordentlig festet.
- Når du går inn eller ut av rullestolen, må du ikke klatre eller legge vekt på foten. Når du prøver å strekke armene over ryggen, gjør det bare til armen kan strekkes ut uten å endre sittestilling.
- Stå ikke i rullestolen.
- Vær oppmerksom på klemfare ved sammenlegging og klargjøring av rullestolen
- Pass på at demonteringspinnen er godt festet bak hjul og ramme på stolen.
- Hvis du må lene deg eller lene deg på stolen, sørg for at forhjulene peker fremover, slik at bunnen av hjulet strekker seg ut for å stabilisere stolen.
- Søk profesjonelle råd når du går opp eller ned bakker på mer enn 10 cm. Hvis du må stoppe i en skråning, unngå brå og raske bevegelser ved bevegelse. Bevegelse kan forårsake ustabilitet på grunn av vinkelen på stolen. Bruk av bremsene kan føre til utilsiktet bremsing, ukontrollert bevegelse eller plutselig låsing. Prøv å ikke endre retning på en rampe, dette kan forårsake ustabilitet og få stolen til å velte.
- Vær forsiktig når du klatrer opp på fortau eller i skrånende, ujevnt eller glatte overflater. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i en betydelig risiko for fall eller skade.
- Ikke bruk rullestolen på en våt, isete eller snødekte skråning.
- Når du bruker produktet, må du ikke overskride en hastighet på 3-5 km/t (3-5 mph).
- Ikke stå på produktets fotstøtter da det er fare for produktet velter.
- Hvis noen deler er skadet, ødelagt, slitt eller mangler, ta kontakt med forhandler.

1. MONTERING AV RULLESTOLEN

Hold håndtakene med begge hender for å skille rammen litt. Skyv begge sider av setetrekket flatheten litt for hånd, slik at rullestolen er foldet ut. (Figur 1)



Figure 1

2. SAMMENLEGGING AV RULLESTOLEN

Først, brett opp begge fotplatene, løft lett opp på begge sider av setetrekket med hendene, og deretter kan det foldes. (Figur 2)



Figure 2

3. BRUK AV BREMSENE

Brukeren holder bremsehåndtakene med begge hender når rullestolen stopper, og flytter deretter bremsehåndtakene frem til selvlåsende tilstand, for å få bakhjulene til å stoppe helt for å holde seg stille. Prosessen for bremsing er fullført (bilde 3).



Figure 3

4 . BRUK AV ARMLENE

Når du tar av armlenet, trykk først på armlensfestet med én hånd for å skille det fra den fremre braketten på seterøret, så kan du vippe det tilbake. Når du monterer armlenet, lag armlenet festemiddel sikt mot posisjonen til frontbraketten til seterøret og trykk lett til selvlåsende feste. (Figur 4)



Figure 4

5. BRUK AV FOTHVILERE

For å montere fotstøtten, plasser hullene slik at de passer med sidene på fotplaten. Monter fotstøttene og roter innover til den lukkes perfekt. For å fjerne fotstøttene, klem håndtaket roterende fotstøtten utover og løft dem opp. (Figur 5)



Figure 5

CARE AND MAINTENANCE



Unnlatelse av å følge oppbevaringsvilkårene kan føre til forringelse av produktet og dermed risiko for alvorlig skade.

- Rengjør produktet regelmessig med varmt vann og en myk klut. Ikke bruk skuremidler, vaskemidler eller løsemidler.
- Tørk med en ren, tørr myk klut for å unngå rust.
- Sørg for at det ikke samler seg smuss eller rusk rundt akselen, bremsene eller hjulene.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor, da dette kan skade aluminium- og polyamidmaterialer.
- Smør hjulene med litt olje hvis de knirker.
- Kontroller med jevne mellomrom slitasjen og etter trekk alle skruer og bolter. Skift ut alle ødelagte, skadde eller slitte deler umiddelbart.
- Kontroller at bremsene fungerer før hver bruk. Sjekk bremsene ved å skyve håndtakene inn i låst posisjon, og deretter prøve å skyve produktet.
- Undersøk rullestolen for å se om alle deler og bolter er løsnet etter en tids bruk. Hvis de er løse, bør de involverte etter trekke dem i tide for at ikke uhell skal skje.
- Sete- og ryggtrekk skal holdes rent og helt for å beskytte brukernes hud.
- Hvis det er feil eller mangler, må du ikke reparere produktet selv. Rådfør deg med en autorisert forhandler.

Sjekkliste:

For å holde produktet i god stand, kontroller før hver bruk, og kontroller regelmessig som følger:

Kontroll av produktet	Alltid	Ukentlig	Hver måned
Skruer og festemidler		X	
Stabiliteten i rammen og ryggen			X
Tilstand på sete og hjul			X
At bremsene og armlenene fungerer	X		
Sammenslåing og oppsetting av rullestol		X	

VED NY EIER

Produktet kan gjenbrukes. Det må først rengjøres og desinfiseres i i henhold til hygienearvisninger. Når du overfører produktet, husk å overlevere alle nødvendige tekniske dokumenter til ny bruker. På forhånd må produktet inspiseres av en autorisert spesialist.

RESIRKULERING

Når produktet er blitt ubrukelig og du må kaste det: kontakt din fagforhandler. Hvis du ønsker å gjennomføre resirkulering for deg selv, spør ditt lokale avfallshåndteringselskap for avhendings retningslinjer.

OPPBEVARING



Unnlatelse av å følge oppbevaringsvilkårene kan føre til forringelse av produktet og dermed risiko for alvorlig skade.

- Ikke oppbevar produktet i en lengre periode i nærheten av en varmekilde eller i solen (f.eks. bak et vindu eller i nærheten av en radiator) eller i nærheten av en kald kilde.
- Hold rullestolen unna alle flammer og gnistkilder.
- Følg betingelsene for oppbevaring og oppbevaring av produktet:
 - På et tørt og temperert sted
 - Beskytt produktet ved å pakke det inn mot støv, korrosjon (f.eks. slipende elementer, sand, sjøvann, salt luft).
 - Oppbevar alle fjernede deler sammen på samme sted (eller merk dem om nødvendig) for å unngå å forveksle dem med andre produkter når de monteres igjen.
 - Alle komponenter må lagres uten belastning (ikke plasser gjenstander som er for tunge på produktelementene, ikke blokker noe...).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	874001.R 874001.G	874006.R 874006.G	874007.R 874007.G	874009.R 874009.G	874012G
Yttermål	Bredde 63.5 x Dybde 97 x Høyde 92 cm	Bredde 58.5 x Dybde 97 x Høyde 92 cm	Bredde 61 x Dybde 97 x Høyde 92 cm	Bredde 66 x Dybde 97 x Høyde 92 cm	Bredde 56 x Dybde 97 x Høyde 92 cm
Sete dimensjon	Bredde 47.5 x Dybde 41 x Høyde 49 cm	Bredde 42.5 x Dybde 41 x Høyde 49 cm	Bredde 45.5 x Dybde 41 x Høyde 49 cm	Bredde 50 x Dybde 41 x Høyde 49 cm	Bredde 40 x Dybde 41 x Høyde 49 cm
Dimensjon når sammenlagt	Bredde 72 x Dybde 27 x Høyde 65 cm	Bredde 72 x Dybde 27 x Høyde 65 cm	Bredde 72 x Dybde 27 x Høyde 65 cm	Bredde 72 x Dybde 27 x Høyde 65 cm	Bredde 72 x Dybde 27 x Høyde 65 cm
Forhjul størrelse	20,32 cm	20,32 cm	20,32 cm	20,32 cm	20,32 cm
Bakhjul størrelse	30,48 cm	30,48 cm	30,48 cm	30,48 cm	30,48 cm
Vekt	14,6 kg	14,2 kg	14,4 kg	14,8 kg	14 kg
Maksimal tillatt bruker vekt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg

Doble parkerings bremses
12" hjul - Polyurethane dekk
Nylon ryggstøtte med skum
Aluminium ramme – malte flater

Levetid

Forventet levetid for dette produktet er 5 år under normal bruk, sikkerhet og vedlikeholds forhold. Utover denne perioden kan produktet brukes så lenge det fortsatt er i god stand.


Garanti

Dette produktet er garantert i to år fra kjøpsdatoen av brukeren. IDENTITIES vil levere reservedeler for alle deler som har gått i stykker på grunn av en produksjons-, design- eller materialfeil. Kontakt distributøren du kjøpte produktet fra i tilfelle du trenger å fremsette et krav. Feil som følge av utilsiktet skade, feilbruk, endring eller slitasje dekkes ikke av denne garantien.

Kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra for å bruke garantien.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
FRANCE

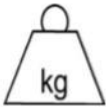

Maksimum bruker vekt
135 kg