

Bruksanvisning



Les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

BETEGNELSE	REFERANSE
Rullestol <i>Standard</i>	1408001
Rullestol standard - sammenleggbar	1408002
Transit rullestol	1408029

MAKSIMAL VEKT FOR BRUKEREN: 120 Kg



1. INTRODUKSJON

VIKTIG MERKNAD: Innholdet i denne bruksanvisning må formidles til rullestolbrukere (både passasjerer og hjelpere) før levering.

Denne brukerveiledningen gjelder rullestolene som er nevnt ovenfor. Aspektene som er beskrevet i denne brukerveiledningen, gjelder for alle modeller, unntatt i behørig identifiserte situasjoner.

Kvaliteten på disse produktene er testet og verifisert før de forlater fabrikken. Det er imidlertid svært viktig å sjekke at produktet du har kjøpt er i perfekte tilstand og at det ikke ble skadet under frakt. I tilfelle skade, ikke bruk produktet og kontakt forhandleren med en gang.

Sjekk at alle deler er inkludert i pakken:

- 1 stol + 1 høyre benstøtte + 1 venstre benstøtte
- 1 *nylonstropp* (for benstøtte)
- 1 skiftnøkkel

TILTENKT BRUK: Dette produktet er utelukkende beregnet for transport og bevegelse av personer med bevegelseshvanser. All annen bruk kan forårsake skader. Denne rullestolen er tilpasset innendørs og utendørs bruk.

EMBALLASJE: Fjern emballasjen fra produktet og kast den i henhold til riktig miljøpraksis.

2. SIKKERHETSTILTAK

For korrekt og sikker bruk av en hvilken som helst modell av rullestoler, vennligst følg alle sikkerhetsadvarslene:

- Åpne stolen helt før bruk;
- Kontroller at alle muttere og bolter er godt festet;
- Sett på bremsene før passasjerer setter seg i stolen for å forhindre at den beveger seg;
- Plasser plastfotstøttene oppreist når passasjerer går inn og ut av stolen (denne prosedyren vil tillate mer stabilitet når beboeren plasserer føttene på bakken og overfører kroppsvekt);
- Plasser plastfotstøttene oppreist når stolen er ledig;
- Fortsett forsiktig når du beveger deg rundt på skrånende overflater (hellingsgraden kan hindre stolens kontroll);
- Brukes forsiktig når du flytter stolen på fuktig glatt overflate (overvåking anbefales);
- Bruk stolen på flate overflater og unngå hindringer (løse tepper, etc.) og slitte gulv;
- Vær spesielt oppmerksom på utendørs bruk;
- Vær spesielt oppmerksom hvis du bærer vesker eller andre gjenstander som kan bli dratt inn i eller fanget i hjulets eiker;
- Stolens bruker skal IKKE forsøke å plukke opp gjenstander fra gulvet alene (enten bruke et riktig verktøy for å gjøre det eller be om hjelp);
- IKKE bruk stolen på rulletrapper;
- Bruk ALDRI bremsen til å kontrollere hastigheten på stolen som pågår - det vil sette passasjerer i fare;
- ALDRI flytte stolen uten fotstøtter foldet ned for å plassere brukerens føtter på;
- Bruk ALDRI stolen uten å feste benstøttestroppen;
- Plasser ALDRI brukeren stående på fotstøttene, da det er fare for å knekke dem;
- Ikke overskrid den maksimale brukervekten på 120 kg.

VIKTIG: Vær spesielt forsiktig når du vipper stolen for å klatre opp et trinn eller et fortau. Stolen må ikke vippes utover likevektspunktet, da hjelperen må bære vekten av både stolen og brukeren. Det må sikres at hjelperen er sterk nok til å kontrollere og betjene stolen.

3. MONTERING

Når du åpner stolen, må du skille armlenene til seteområdet er horisontalt og helt strukket ut. Med hjulene i kontakt med bakken, sett på benstøttene. Juster glideholderen med støttepinnene for løftebenet (figur 1). Plasser glideholderen på pinnene ved hjelp av hullene. Vri skinnen på pinnene (figur 2) inn i stolen til den låses (figur 3).

FORSIKTIG: Når du lukker benstøttene, vær forsiktig og oppmerksom, ikke klem fingrene.



Fig.1



Fig.2

Vri plastfotstøttene ned til de er i horisontal stilling. Juster posisjonen ved å løsne låsemutteren og skyv plastfotstøttene mot bakken. Fest låsemutterne godt etter justeringen.

VIKTIG: La det være nok plass mellom plastgulvstøttene og gulvet for å unngå kollisjoner med hindringer, fortau osv.

Plasser benstøttestroppen ved å feste borrelåsen rundt de vertikale rullerørene (figur 4). Dette stroppebeltet forhindrer at brukerens føtter går under setet når rullestolen beveger seg.



Fig.3

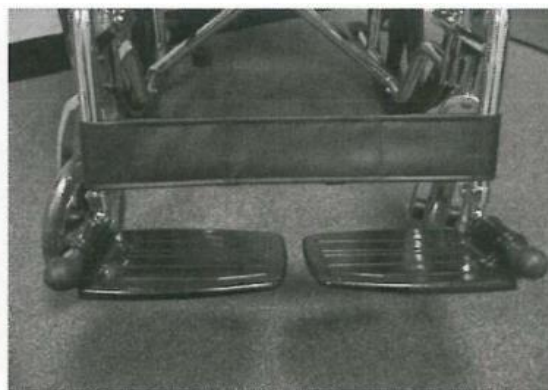


Fig.4

4. BRUK AV RULLESTOL

FØR BRUK: Kontroller at alle muttere og bolter er godt festet (en skiftnøkkel følger med til dette formålet). Hvis aktuelt, sjekk luften på de pneumatisk hjulene (IKKE bruk stolen med dekkene tomme for luft). Sjekk at det ikke er noen skade på hjulene, setet eller ryggstoffene.

Forsikre deg om at de sammenleggbare armlenene er godt sikret.

På rullestolreferanser 1408001, 1408002 og 1408029 må brukeren benytte seg av løpehjulet som er plassert på hjulene for å bevege stolen frem og tilbake, ved å bruke et av hjulene til å styre den. På alle modeller må hjelperne holde på håndtakene øverst bak på ryggstøtten.

VIKTIG: Bruk bare løpehjulet til å enten øke farten eller kjøre rullestolen (bruk av hjulfelger eller eiker kan føre til skade på brukeren).

På baksiden av stolen er det en lomme for dokumenter ol.. På baksiden er det 2 rør som hjelperen må trykke med foten for å løfte/vippe opp fronten av stolen når det trengs (Opp fortauskanter, etc.).

Manufacturer

SHANGHAI HUMANCARE MEDICAL CO., LTD.
Room 602, 3th building, No. 658 Laiyin
Road
Jiuting District, Songjiang, Shanghai, PRC

EU Representative

SUNGO Europe BV
Olympisch Stadion 24,
1076DE, Amsterdam
Netherlands

Distributor in Portugal

INTERESPUMA - INDÚSTRIAS DE
POLIURETANOS, LDA.
R. Solidariedade, Z.I. Alféolas
3780-315 Anadia